

pts connect™ dock



用户指南

预期用途

PTS Connect™ 适配器系统适用于专业客户。PTS Connect 适配器系统可使 A1CNow® 系统和 PTS Detect™ 分析仪将最近测试结果传输至连接的计算机中。

硬件要求

已包含：

- PTS Connect 适配器
- USB-RS232 串行适配器（适配器）
- USB-USB 电缆

必要但未包含：

- 带可用 USB 端口的计算机

操作

进行以下步骤即可将最近测试结果从分析仪传输到

配备了可用 USB 端口的计算机中：

1. 将所提供的适配器的 9 针凸接头与 PTS 连接
连接适配器的 9 针凹接头。
2. 将所提供的 USB 电缆接头与适配器连接，将另一端
与计算机上的可用端口连接。
3. 运行用于从 PTS Connect 适配器中捕捉结果的应用。
4. 在 A1CNow 分析仪或 PTS Detect 分析仪上运行测试。
5. 测试完成，待屏幕上显示结果之后，将
测试药筒从分析仪上移除。
6. 将分析仪放置在 PTS Connect 适配器的托架上，并在做好数据下载的准备时按下
。
7. 分析仪将显示“适配器”字样，结果将被传输给
应用。
8. 从 PTS Connect 适配器上取下分析仪。
9. PTS Connect 适配器已做好传输下一个测试结果的准备。

符号解释	
	目录号
	请参考使用说明
	欧盟授权代表
	批号
	厂商
	本产品符合欧洲指令 96/79 EC 有关体外诊断医疗器械的要求
	分类收集：电池必须按照贵国法律妥善处理。有关在您所在区域处理和回收的相关法律，请联系地方行政主管部门。



Polymer Technology Systems, Inc.
7736 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 USA

要获取关于PTS Connect™ 适配器的帮助

请致电PTS Diagnostics 客户服务：

1-877-870-5610 (美国境内拨打免费)

+1-317-870-5610 (直拨) +1-317-870-5608 (传真)

电子邮箱：inforequest@ptsdiagnostics.com

网址：www.ptsdiagnostics.com

PN 91180 CH



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany