

CardioChek Link[®]

Benutzerhandbuch

CardioChek Link® Benutzerhandbuch

Dieses Softwareprogramm ist mit den Betriebssystemen Microsoft Windows® 7, Windows® 8.X, Vista kompatibel

A. Verwendungszweck

CardioChek Link® ist eine Software, die dazu verwendet wird, Testergebnisse von einem CardioChek® PA oder CardioChek® Plus analysegerät abzurufen, damit die Ergebnisse auf einem Computer gespeichert und ausgedruckt werden können. Die Software ist nicht für die Verwendung mit anderen Geräten geeignet. Auf einem Computer kann jeweils nur eine Kopie der CardioChek Link Software eingesetzt werden, auch verbindet sich ein Computer nur mit einem einzigen CardioChek analysegerät. Werden mehrere CardioChek Link Fenster geöffnet, so ist nur das erste Fenster funktionsbereit. Werden mehrere Messgeräte verbunden, so wird nur das erste Gerät erkannt.

B. Benötigte Materialien

1. CardioChek® PA oder CardioChek® Plus analysegerät
2. CardioChek Link-USB-Kabel

C. Bevor Sie die CardioChek Link Software installieren


1. Schließen Sie alle anderen Programme.
2. Vergewissern Sie sich, dass das CardioChek Link-USB-Kabel nicht mit Ihrem Computer verbunden ist.

D. Installation der CardioChek Link Software


1. Doppelklicken Sie auf "CardioChek_Link.setup.exe".
2. Es wird ein **Bestätigung** angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie das Programm installieren möchten. Klicken Sie auf „Ja“ oder „Nein“. Falls CardioChek Link noch nie auf Ihrem Computer installiert wurde, wird diese Meldung nicht angezeigt.




3. Das Installationsprogramm QSetup Installation Suite wird geladen.

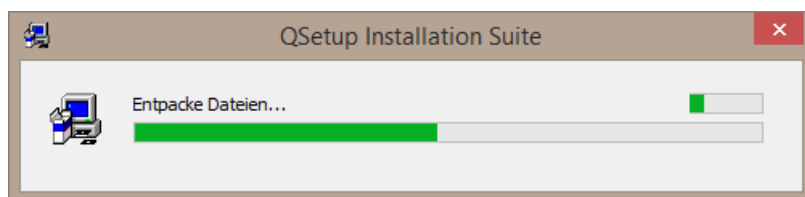


4. Der **Bildschirm zur Sprachauswahl** wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie anschließend auf „OK“.

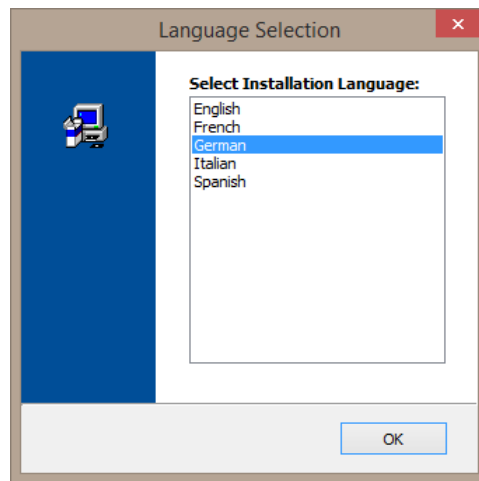

5. Der **Willkommen** erscheint. Klicken Sie auf „Weiter“; um die Installation fortzusetzen.

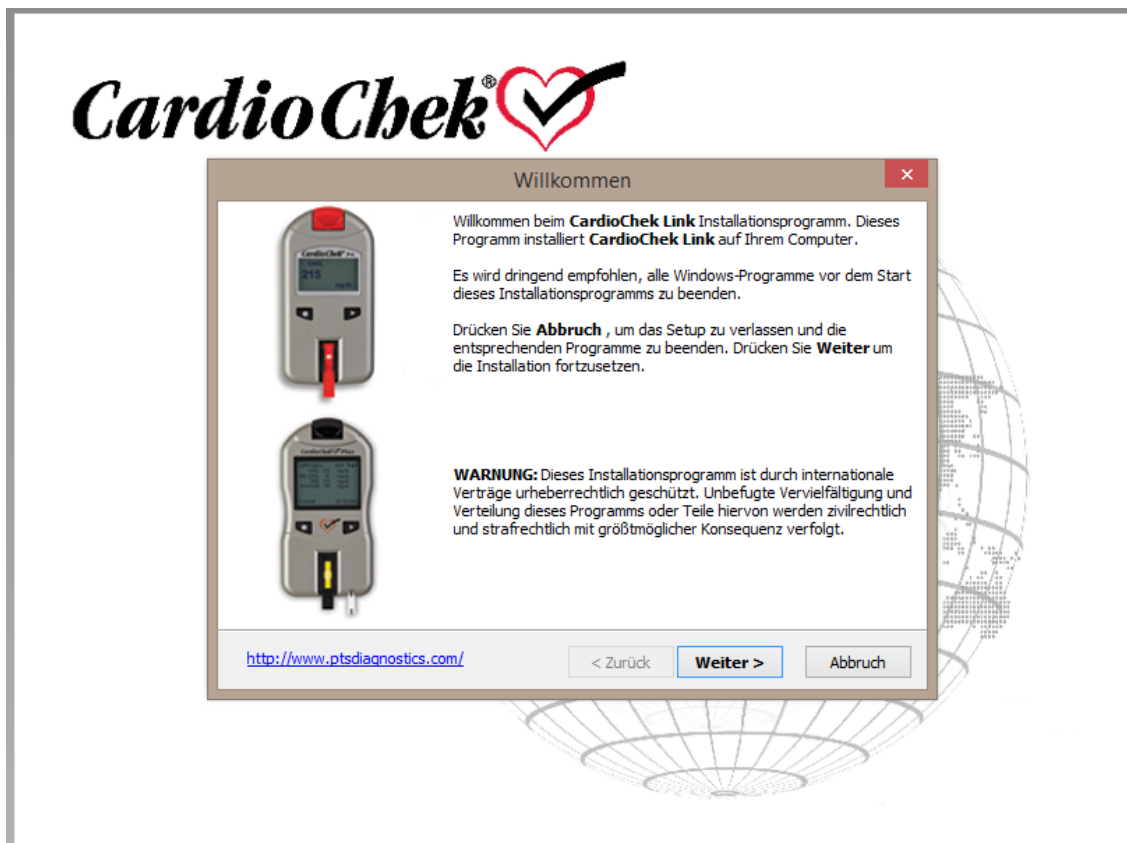


6. Auf dem nächsten Bildschirm wird die **Endanwender-Lizenzvereinbarung** angezeigt. Wenn Sie „Ja“ wählen und auf „Weiter“ klicken, wird die Installation fortgesetzt. Wenn Sie auf „Nein“ klicken, können Sie die Software nicht installieren.

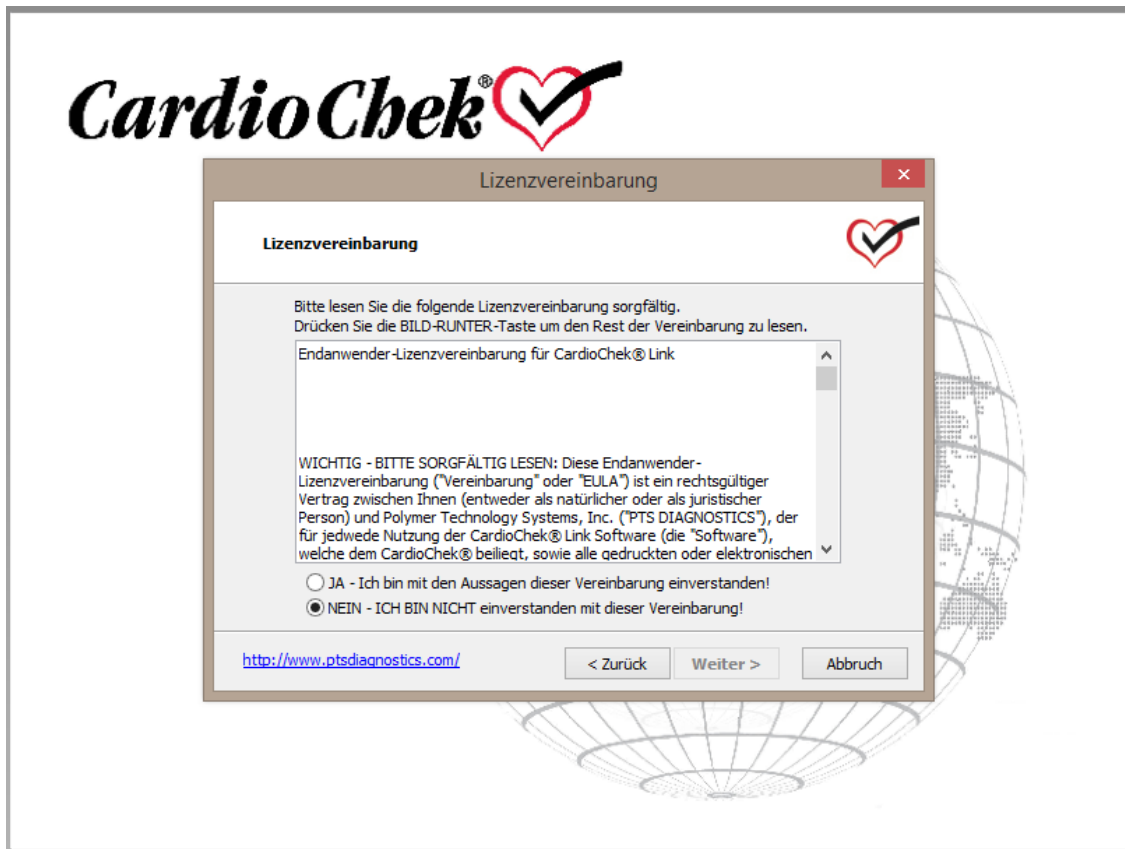


7. Der „Lies mich“ Bildschirm erscheint. Lesen Sie die einzelnen Schritte durch und klicken Sie anschließend auf „Weiter“.




8. Der **Bildschirm „Wählen Sie das Zielverzeichnis“** wird angezeigt. Sie können entweder das Standardverzeichnis wählen, das angezeigt wird, oder auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ klicken, um ein anderes Verzeichnis zu wählen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

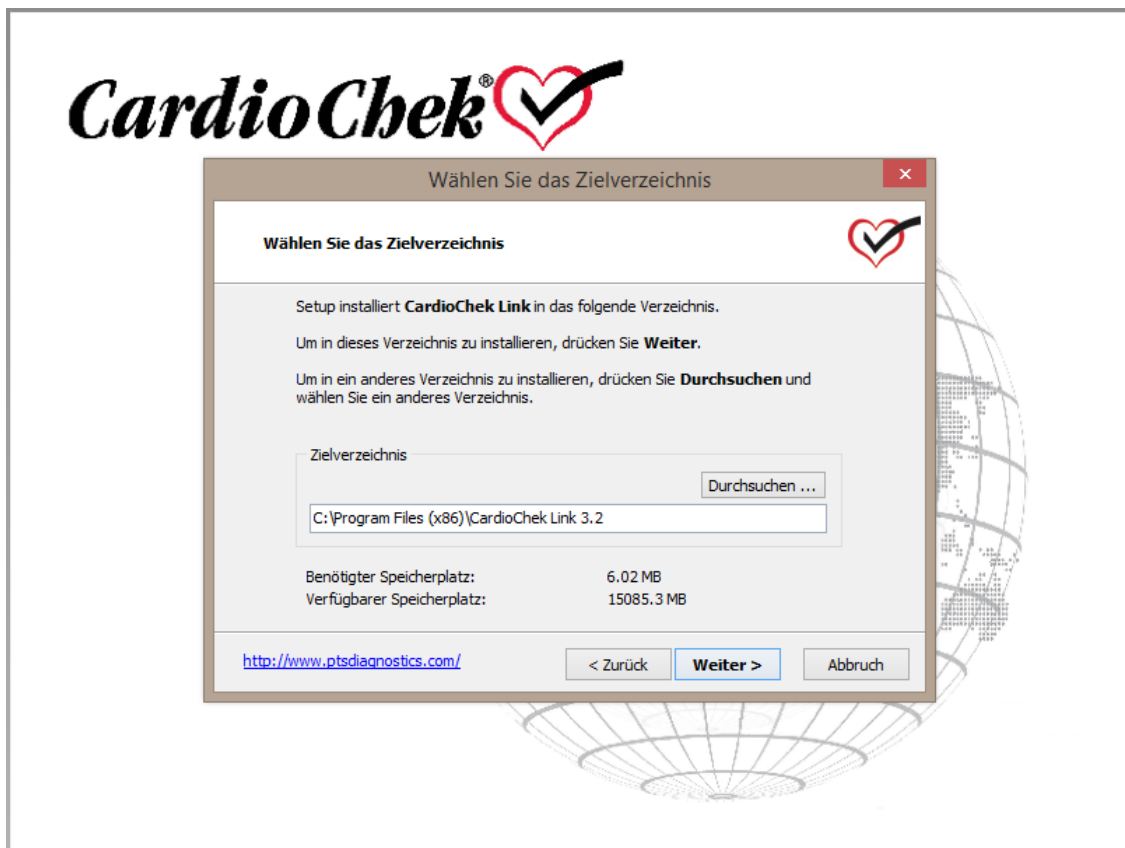


9. Der Bildschirm „**Programmsymbol**“ wird angezeigt, hier können Sie wählen, ob Sie eine Verknüpfung zur CardioChek Link Software auf dem Desktop und/oder in der Schnellstartleiste einrichten möchten. Klicken Sie die Felder an, um die entsprechenden Verknüpfungen auszuwählen, falls Sie keine Verknüpfungen einrichten möchten, lassen Sie die Felder einfach leer. Klicken Sie auf „Weiter“.

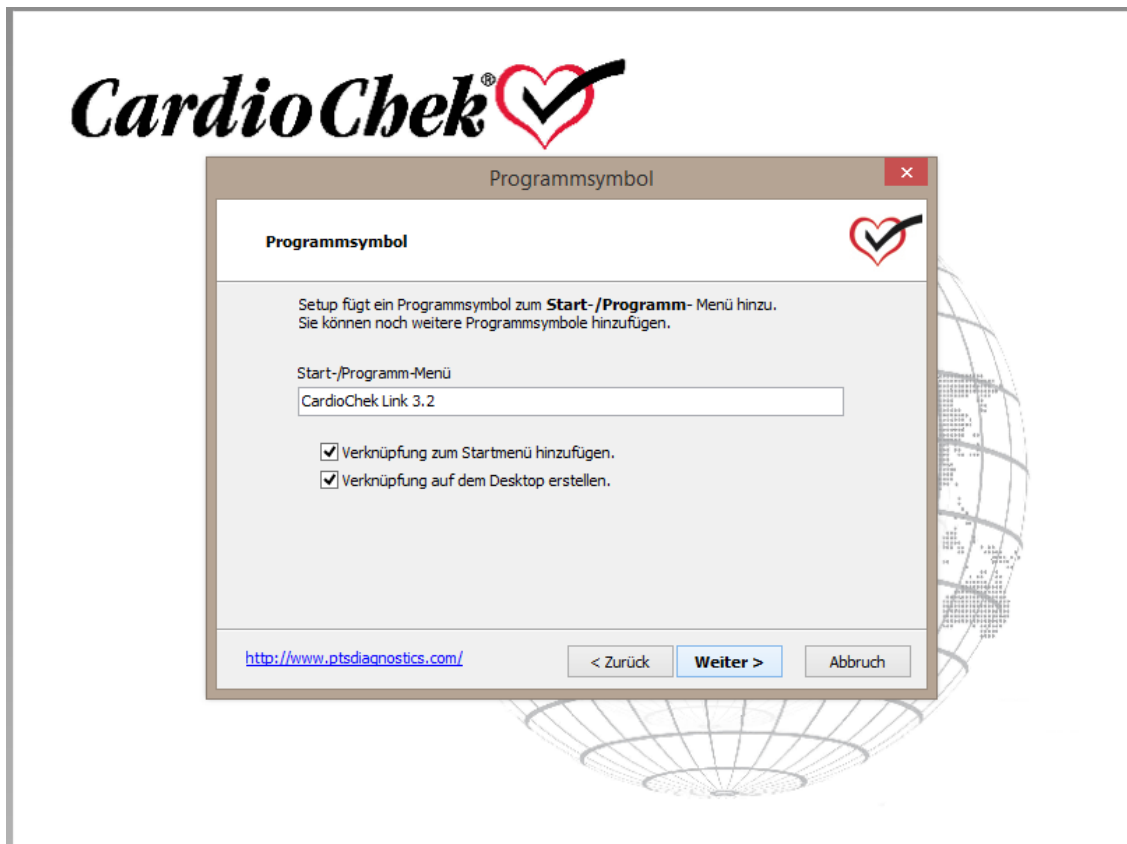

10. Der Bildschirm „**Bestätigung der Einstellungen des Setup**“ erscheint. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation fortzusetzen. Um Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf „Zurück“.

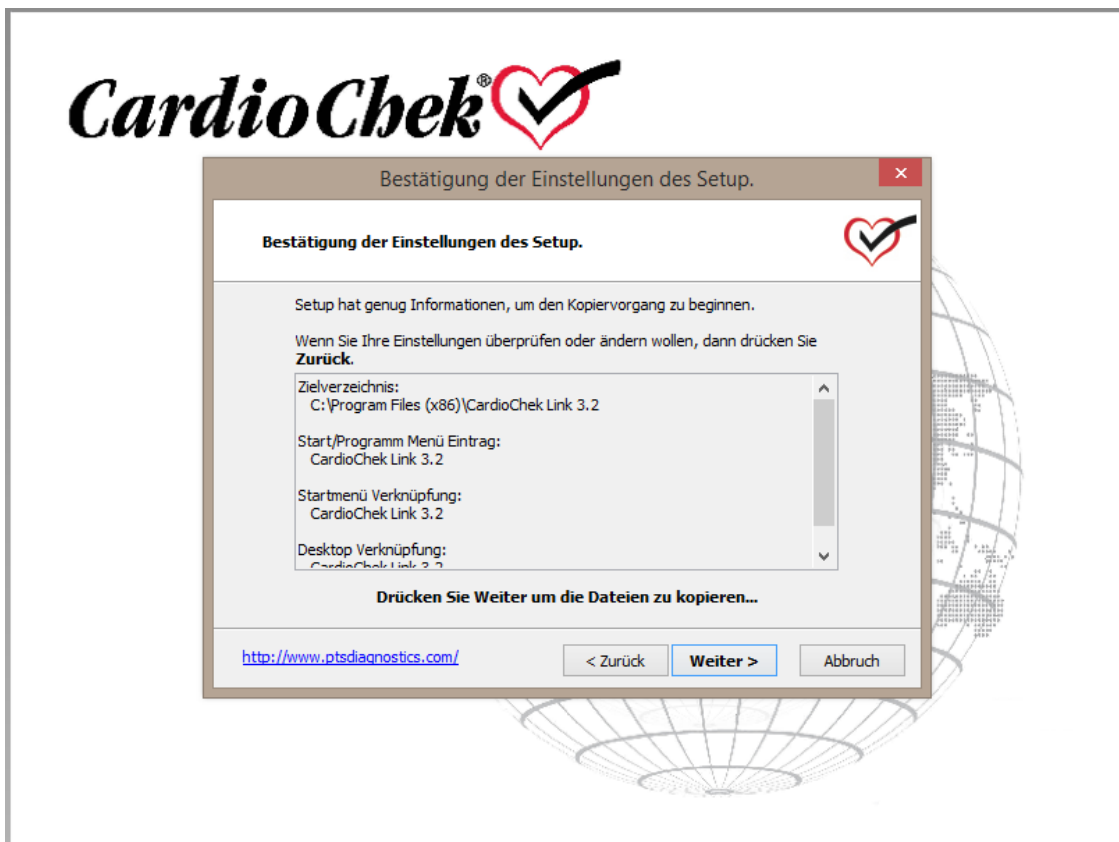


11. Sobald Sie auf „Weiter“ klicken, beginnt das System damit, **die Dateien zu kopieren**, nach Beendigung dieses Vorgangs wird der Bildschirm „**Dateien kopieren**“ angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“, um die Software zu starten.

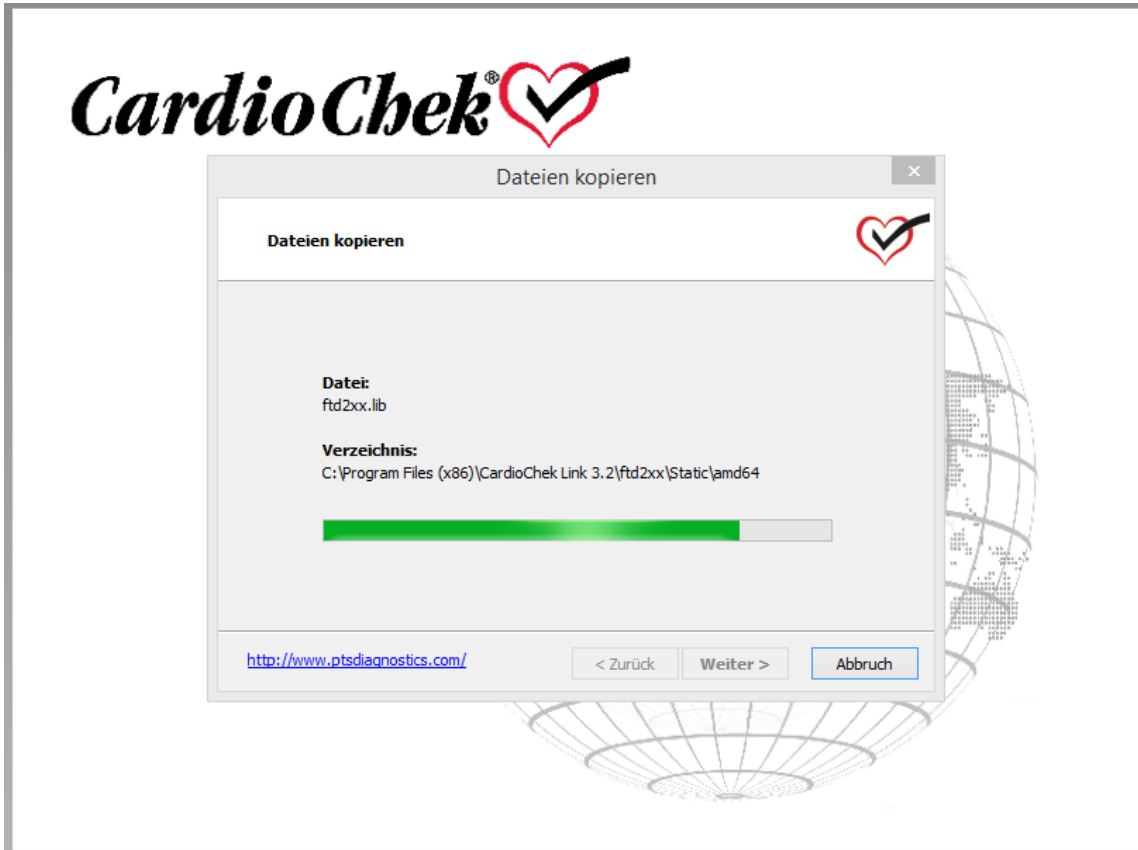

12. Ein **Benachrichtigungsfenster** wird angezeigt, sobald die Software aktualisiert wurde. In diesem Fenster wird folgende Nachricht angezeigt: „**Herzlichen Glückwunsch, CardioChek Link wurde erfolgreich aktualisiert!**“ Klicken Sie auf „OK“.

13. Nachdem Sie die CardioChek Link[®] Software und Treiber installiert haben, stecken Sie das CardioChek Link USB-Kabel in den MEMo Chip[®] Port (siehe Abbildung). Dann schließen Sie das Kabelende mit dem USB-Anschluss an den Computer an.

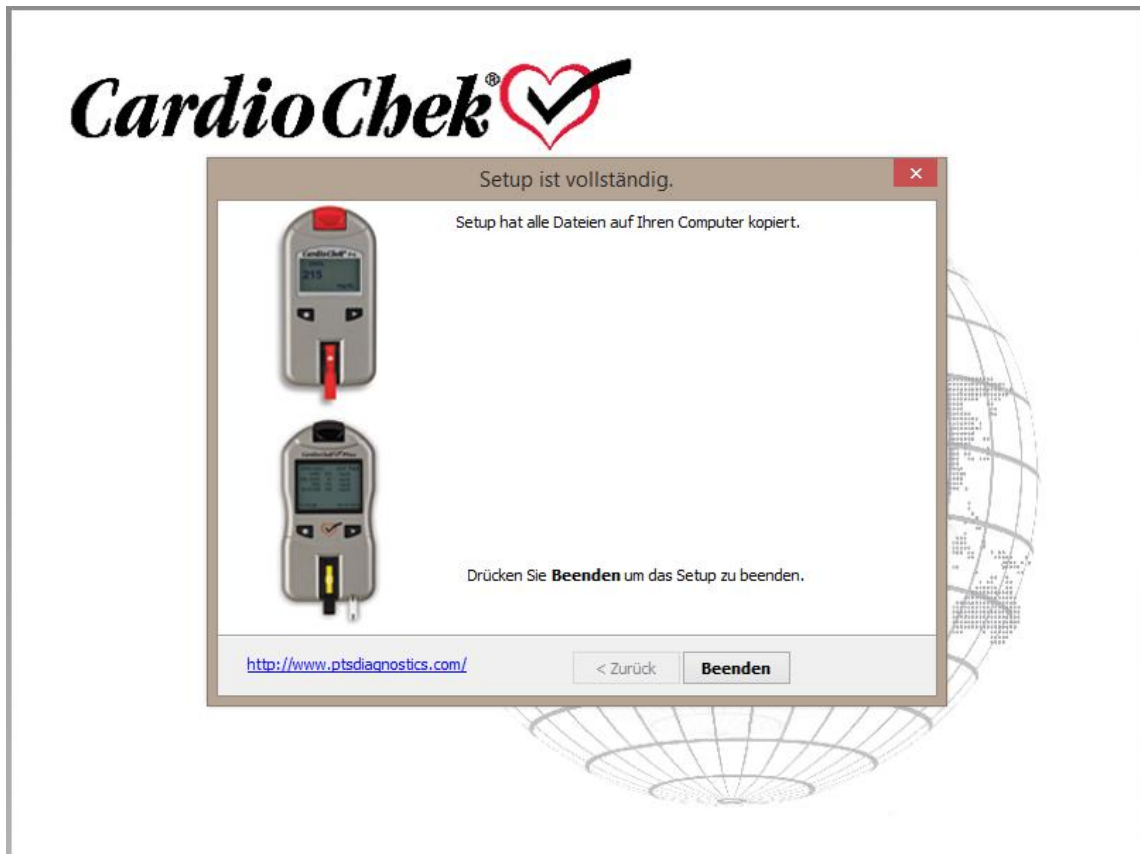

14. Wird das Fenster „Hardwareinstallation“ angezeigt, klicken Sie auf „Dennoch fortsetzen“, um die Installation fortzusetzen.
15. Warten Sie, bis Windows die neue Hardware gefunden hat und die Installation abgeschlossen ist.
16. Sobald der COMPUTER die Meldung „Neue Hardware gefunden“ anzeigt, ist CardioChek Link einsatzbereit.

E. Verwendung von CardioChek Link®

1. Sobald der CardioChek Link an Ihrem Computer angeschlossen ist, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem CardioChek analysegerät, um das analysegerät einzuschalten.
2. Starten Sie das CardioChek Link Programm auf dem Computer per Doppelklick auf das CardioChek Link Symbol oder über das Menü: Start > Programme (Alle Programme) > CardioChek Link und Klick auf das CardioChek Link Symbol. Sie können auch direkt auf das Verzeichnis Programmdateien\CardioChek Link (oder das Verzeichnis, in dem Sie die Software installiert haben) zugreifen, um das CardioChek Link-Programm zu starten. Beim ersten Öffnen von CardioChek Link wird die Meldung „Neue Hardware gefunden“ angezeigt.
3. Geben Sie den **Namen** und die **Identifikationsnummer der testenden Person** sowie den **Namen** und die **Identifikationsnummer des Patienten** in die entsprechenden Felder ein. **Name** und **Identifikationsnummer der testenden Person und des Patienten** sind Pflichtfelder und müssen vor dem Test eingegeben werden, um die ordnungsgemäße Identifizierung des Patienten zu gewährleisten. Neue Patientendaten müssen jedes Mal eingegeben werden, wenn ein neuer Patient getestet wird.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Testergebnisse abrufen**, um das CardioChek Link Programm auf den Empfang von Daten vom CardioChek Connect analysegerät vorzubereiten.
5. Verwenden Sie das CardioChek Connect analysegerät, um einen Test durchzuführen. Während das Programm CardioChek Link auf die Daten des CardioChek analysegerät wartet, wird der Bildschirm **Warte auf Messdaten vom CardioChek Analysegerät** mit einem blinkenden CardioChek Herzsymbol angezeigt.

CardioChek® Link 3.2

Hilfe Stellen Sie sicher, PA Analysator Druckausgabe auf PC eingestellt

Tester
Name: PTS Diagnostics
Nummer: 317-870-5610

Patient
Name: CardioChek
Nummer: 2014

Messung
Datum:
Ergebnis:
Charge:

CardioChek Link
Warten auf Daten aus CardioChek Analyse
Abbrechen

CardioChek Connect
PTS Diagnostics
Indianapolis, IN,
USA

Kopieren Drucken Speichern
Daten empfangen

Registrieren Sie Ihr CardioChek Analyzer Beenden

CardioChek Link Kabel erkannt

6. Sobald der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse automatisch auf dem Computerbildschirm angezeigt.

The screenshot shows the CardioChek Link 3.2 software window. The title bar reads "CardioChek® Link 3.2". Below the title bar, there is a "Hilfe" (Help) button and a status message: "Stellen Sie sicher, PA Analysator Druckausgabe auf PC eingestellt".

The interface is divided into several sections:

- Tester:** Name: PTS Diagnostics, Nummer: 317-870-5610
- Patient:** Name: CardioChek, Nummer: 2014
- Messung:** Datum: 13 OCT 2014, 11:55 AM; Ergebnis: CHEM; Charge: CODE Q303 (Lipid+eGLU)
- Test Results Table:**


| | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| CHOL | 133 mg/dL | CALC LDL | 45 mg/dL |
| HDL CHOL | 42 mg/dL | TC/HDL | 3.1 |
| TRIG | 224 mg/dL | LDL/HDL | 1.1 |
| eGLU | 133 mg/dL | NON-HDL | 90 mg/dL |
- Buttons:** Kopieren, Drucken, Speichern, and a highlighted "Daten empfangen" button.
- Footer:** CardioChek Connect logo, PTS Diagnostics Indianapolis, IN, USA, and a "Beenden" button.

At the bottom left, a status bar indicates "CardioChek Link Kabel erkannt".

7. Sie können nun die Funktionen **Kopieren**, **Drucken** oder **Speichern** des Programms verwenden, um die Testergebnisse zu speichern und aufzuzeichnen.
8. Wählen Sie **Kopieren**, um die Testergebnisse in ein anderes Programm wie Microsoft Notepad oder Microsoft Excel einzufügen.
9. Um die Ergebnisse auszudrucken, wählen Sie die Schaltfläche **Drucken** und folgen Sie den Anweisungen Ihres Computers.
10. Um eine Kopie der Ergebnisse als Excel-Tabelle zu speichern, wählen Sie **Speichern** und geben Sie einen Dateinamen ein. Die erstellte Datei hat das CSV-Format (Comma Separated Values). Um weitere Testergebnisse in dieselbe Tabelle zu übernehmen, wählen Sie **Speichern** und geben Sie dann den selben Dateinamen wie zuvor ein, um die neuen Patientendaten und Testergebnisse hinzuzufügen. Um Daten in einer neuen Excel-Tabelle zu speichern, wählen Sie **Speichern** und geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
11. Um eine gespeicherte Datei zu öffnen, gehen Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet und doppelklicken Sie auf die Datei. Die Datei wird automatisch in Excel geöffnet.
12. Wurde ein Test durchgeführt, bevor die Schaltfläche **Testdaten empfangen** angewählt wurde, so werden die Ergebnisse nicht auf dem CardioChek Link Bildschirm angezeigt und auf dem CardioChek analysengerät erscheint die Meldung **DRUCKFEHLER**. Die

Ergebnisse gehen **NICHT** verloren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Testdaten empfangen** und wählen Sie das Ergebnis, das Sie aus dem Menü des CardioChek analysegerät Speichers ausdrucken oder speichern möchten. Im Benutzerhandbuch des CardioChek analysegerät finden Sie Anweisungen für den Zugriff auf den Speicher.

13. Weitere Hinweise und Hilfe finden Sie im Drop-down-Menü **Hilfe** in der oberen linken Ecke der CardioChek Link Symbolleiste.

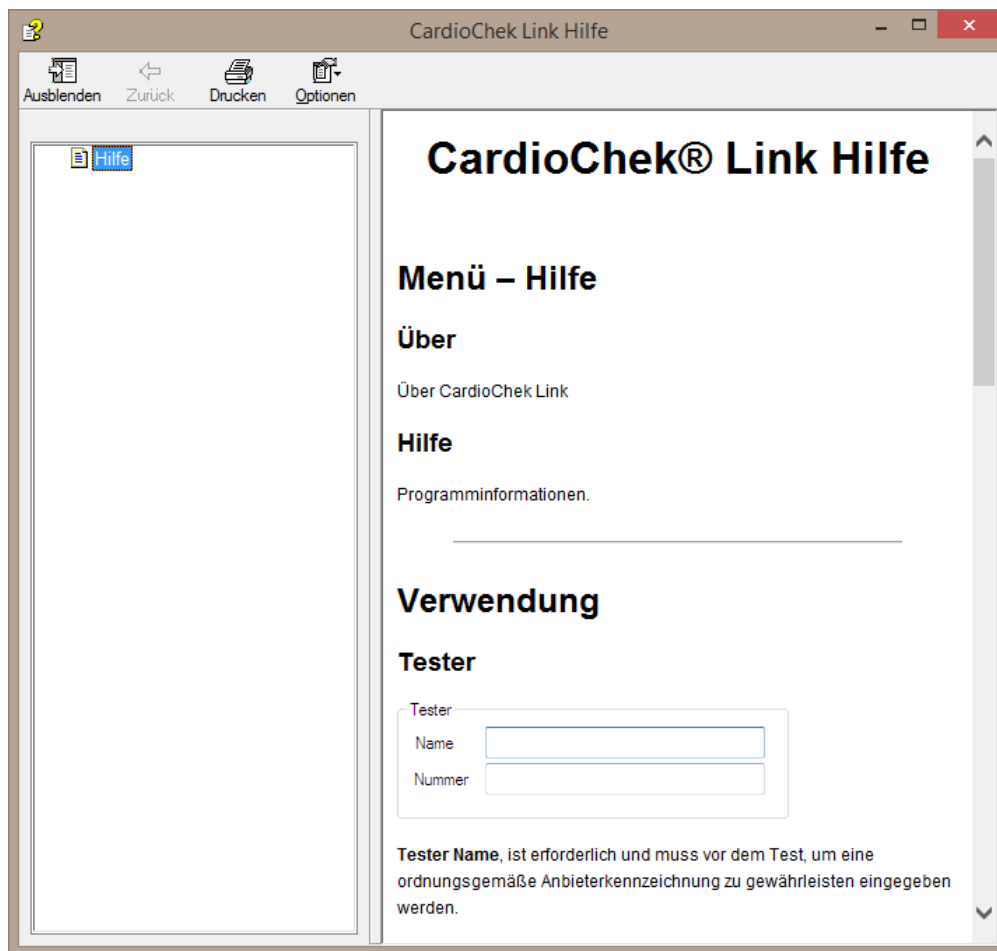

CardioChek Link® wird in den USA hergestellt von der Firma
PTS Diagnostics, Indianapolis, IN 46268

Wenn Sie Unterstützung mit CardioChek Link®

benötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Kundenservice von PTS Diagnostics:
+1-877-870-5610 (gebührenfrei innerhalb der USA) +1-317-870-5610 (Direktdurchwahl)
+1-317-870-5608 (Fax)

E-Mail: inforequest@ptsdiagnostics.com

Website: www.ptsdiagnostics.com

PS-002977 DE Rev. 0

