

Para uso con los analizadores A1CNow® y PTS Detect®



pts connect
Blu-Dock™

Guía de usuario del PTS Connect Blu-Dock

Instrucciones de seguridad importantes

1. Los usuarios deben seguir la guía de usuario para utilizar el dispositivo PTS Connect Blu-Dock™. Si utiliza el dispositivo de una forma no especificada en la guía de usuario, podría mermar la protección suministrada por el equipo.
2. Antes de utilizar el dispositivo, el usuario debe inspeccionarlo visualmente para asegurarse de que no presente ningún daño físico. De no hacerlo, podrían acabar generándose resultados poco fiables o el usuario podría sufrir lesiones.
3. A la hora de inspeccionar visualmente el dispositivo, asegúrese de quitar las pilas para evitar la posibilidad de sufrir descargas eléctricas.

Requisitos de hardware

Materiales proporcionados

REF 4715 Dispositivo PTS Connect Blu-Dock (1)
*Incluye cuatro (4) pilas alcalinas AA
y un estuche para el dispositivo*

Materiales no proporcionados necesarios para transferir datos

Ordenador, tableta o teléfono inteligente

Deben poder conectarse a un dispositivo Bluetooth® BLE

Aplicación

Debe poder aceptar datos del dispositivo PTS Connect Blu-Dock

Materiales no proporcionados necesarios para imprimir los resultados

Impresora CardioChek®/PTS Connect®

Incluye cables de conexión de la impresora, fuente de alimentación y etiquetas

Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante en www.ptstdiagnostics.com/pts-connect-blu-dock.html.

Uso previsto del dispositivo PTS Connect Blu-Dock

El dispositivo PTS Connect Blu-Dock está diseñado para transferir los resultados de los análisis realizados con los analizadores A1CNow o PTS Detect. Los resultados se pueden transferir inalámbricamente a un dispositivo informático con conectividad Bluetooth, a través de un cable de CardioChek Link® conectado a un dispositivo informático, o a una impresora CardioChek/PTS Connect conectada.

Colocación y extracción de las pilas

Importante: NO almacene el dispositivo PTS Connect Blu-Dock con las pilas alojadas en su interior. Extraiga las pilas antes de almacenarlo.

Colocación de las pilas:

1. Abra la tapa de las pilas que se encuentra en la parte inferior del PTS Connect Blu-Dock soltando el cierre y retirándola de la parte posterior del dispositivo.
2. Inserte las pilas en el compartimento con los polos positivos (+) orientados según lo indicado en la parte interior del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Extracción de las pilas:

1. Abra la tapa de las pilas que se encuentra en la parte inferior del PTS Connect Blu-Dock soltando el cierre y retirándola de la parte posterior del dispositivo.
2. Golpee firmemente el dispositivo con la palma de la mano para extraer las pilas del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Emparejamiento

Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver las instrucciones sobre cómo emparejar el dispositivo en cuestión con el PTS Connect Blu-Dock.

1. Cerciórese de que las pilas estén colocadas en el dispositivo PTS Connect Blu-Dock. El dispositivo debería poder detectarse (en el menú de los dispositivos Bluetooth disponibles, busque el nombre "PTS- {Bluetooth ID}"). Verifique que los dígitos del ID impreso en la etiqueta inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Dock coincidan con los del "PTS- " detectado.
2. Debe emparejar solo un dispositivo al PTS Connect Blu-Dock. Si empareja el PTS Connect Blu-Dock con varios dispositivos, aumentará la probabilidad de que los resultados de los análisis se envíen por error al dispositivo equivocado.
3. Cuando se le pida que introduzca un número PIN, escriba el que figura en la parte inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
4. Si el número PIN introducido es correcto, el dispositivo se emparejará con el dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
5. La tableta, el ordenador o el teléfono inteligente le indicarán mediante un mensaje que el dispositivo PTS Connect Blu-Dock se ha emparejado correctamente.
6. Realice un análisis de muestra o envíe un resultado de la memoria del analizador a la aplicación de captura de datos. (Consulte en la guía de usuario de los analizadores A1CNow o PTS Detect las instrucciones para ejecutar un análisis.)
7. **Importante:** Verifique que los resultados mostrados en el analizador coincidan con los de la aplicación de captura de datos. Este paso asegura que el dispositivo PTS Connect Blu-Dock esté correctamente emparejado con la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente asociados.

Desemparejamiento

Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver las instrucciones sobre cómo desemparejar el dispositivo en cuestión del PTS Connect Blu-Dock. Si el PTS Connect Blu-Dock no se desempareja del dispositivo correctamente, aumentará la probabilidad de que los resultados del análisis se envíen por error al dispositivo equivocado en la próxima transferencia de datos. **Importante:** Este paso asegura que el dispositivo PTS Connect Blu-Dock no se empareje automáticamente con el dispositivo informático la próxima vez que se utilice.

Transferencia de resultados a una aplicación de captura de datos

Realice los pasos que se indican a continuación para transmitir el último resultado de un analizador A1CNow o PTS Detect a un dispositivo PTS Connect Blu-Dock con una aplicación de captura de datos.

1. Asegúrese de que las pilas estén colocadas en el dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
2. Ejecute la aplicación en el dispositivo informático que captura los resultados del dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
3. Ejecute un análisis en un analizador A1CNow o PTS Detect.
4. Cuando haya finalizado el análisis y el resultado aparezca en pantalla, extraiga el cartucho de análisis del analizador.
5. Coloque el analizador en la base del dispositivo PTS Connect Blu-Dock y presiónelo hacia abajo para transferir el resultado.
6. En cuanto se hayan transferido los resultados correctamente, el dispositivo PTS Connect Blu-Dock emitirá un pitido de dos tonos. En cuanto oiga el pitido, podrá soltar el analizador. El resultado se habrá transferido a la aplicación.
7. Extraiga el analizador del dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
8. El dispositivo PTS Connect Blu-Dock estará listo para transferir el resultado del siguiente análisis.

Impresión de los resultados en la impresora CardioChek/PTS Connect

Realice los pasos que se indican a continuación para transmitir el último resultado de un analizador A1CNow o PTS Detect a una impresora CardioChek/PTS Connect e imprimir una etiqueta.

1. Asegúrese de que las pilas estén colocadas dentro del dispositivo PTS Connect Blu-Dock.
2. Acople un cable de conexión de impresora CardioChek/PTS Connect al puerto situado en la parte posterior del dispositivo PTS Connect Blu-Dock mediante el conector MEMO Chip®.
3. Conecte el otro extremo del cable a una impresora CardioChek/PTS Connect.
4. Envíe un resultado a la impresora ejecutando un análisis en un analizador A1CNow o PTS Detect.

- Coloque el analizador en el dispositivo PTS Connect Blu-Dock y presiónelo hacia abajo.
En cuanto oiga un pitido de dos tonos, podrá soltar el analizador.
- La etiqueta empezará a imprimirse.

Especificaciones

Dispositivo PTS Connect Blu-Dock

Pilas: 2 pilas alcalinas AA de 1,5 voltios

Valores eléctricos nominales: 5Vdc y 200mA

Valores ambientales:

- Uso en interiores
- Temperatura: 5-50 °C (41-122 °F)
- Humedad: <= 80 %

Códigos sonoros del PTS Connect Blu-Dock

Fase de funcionamiento	Qué esperar
Encendido	Una serie de tonos ascendentes. Este tono suena siempre que se enciende el producto.
Apagado	Una serie de tonos descendentes. Este tono suena cuando el producto se deja inactivo durante al menos 3 minutos.
Error	Un tono descendente más largo que solo se emite una vez.
Emparejamiento	Un solo y breve tono que se emite una vez cada 10 segundos cuando el producto está listo para emparejarlo a un dispositivo Bluetooth.
Diagnóstico	Un tono bajo seguido de un número variable de tonos más elevados.
Transferencia de resultados	Dos tonos distintos, emitidos muy seguidos el uno del otro.

Símbolos

 Consulte las instrucciones de uso

 Límite de temperatura

 Precaución

 Federal Communications Commission (FCC)

 Fabricante

 Número de catálogo

 Fecha de fabricación

 De acuerdo con la directiva RAEE, este producto requiere una recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos

 Mantener alejado de la luz solar

 Mantener seco

 Código de lote

 Este producto cumple con los requisitos de la Directiva europea 2014/53/EU para equipo de radio.



Polymer Technology Systems, Inc.
4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 (EE. UU.)
Línea directa: +1-317-870-5610 • Llamada gratuita desde EE. UU.: 1-877-870-5610 • Fax: +1-317-870-5608
Correo electrónico: customerservice@ptsdiagnostics.com • Sitio web: ptsdiagnostics.com



FCC-ID: A8TBM71S2

Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante en www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-dock.html.

A1CNow, CardioChek, CardioChek Link, MEMo Chip, PTS Connect Blu-Dock y PTS Detect son marcas registradas de Polymer Technology Systems, Inc. El resto de las marcas y denominaciones pertenecen a sus respectivos propietarios.
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.
PS-005514 ES Rev. 1 02/19