

Para uso profesional con analizadores
CardioChek® PA y CardioChek® Plus



pts connect
Blu-Adapter™

Instrucciones de seguridad importantes

1. Los usuarios deben seguir la guía de usuario para utilizar el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter™. Si utiliza el dispositivo de una forma no especificada en la guía de usuario, podría mermar la protección suministrada por el equipo.
2. Antes de utilizar el dispositivo, el usuario debe inspeccionarlo visualmente para asegurarse de que no presente ningún daño físico. De no hacerlo, podrían acabar generándose resultados poco fiables o el usuario podría sufrir lesiones.

Requisitos de hardware

Materiales proporcionados

REF 4718 Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter (1)
Incluye dos (2) soportes (para su uso solo con el analizador CardioChek® PA)

Materiales no proporcionados necesarios para transferir datos

Ordenador, tableta o teléfono inteligente

Deben poder conectarse a un dispositivo Bluetooth® BLE.

Aplicación


Debe poder aceptar datos del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

Instrucciones de los soportes del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter (solo analizadores CardioChek PA)

Si utiliza el analizador CardioChek PA, los dos (2) soportes incluidos deben conectarse antes de usar el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

Siga los pasos que se describen a continuación para conectar los soportes al dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

1. Presione suavemente las pestañas del soporte e introdúzcalas en las dos ranuras situadas cerca de la parte superior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
2. Libere el soporte para fijarlo en su sitio.
3. Para extraer los soportes, presione suavemente el soporte por los lados izquierdo y derecho y tire hacia afuera de las ranuras del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

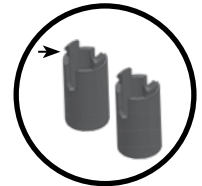

Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante en www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

Guía de usuario de PTS Connect Blu-Adapter

Uso previsto del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

El dispositivo PTS Connect Blu-Adapter se ha diseñado para transferir los resultados de los análisis de los analizadores CardioChek PA y CardioChek Plus a un dispositivo compatible con Bluetooth utilizando el puerto MEMO Chip® del analizador.

Emparejamiento

Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver las instrucciones sobre cómo emparejar el dispositivo en cuestión con el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

1. Compruebe que el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter esté conectado en el puerto MEMO Chip del analizador CardioChek PA o CardioChek Plus y que este último esté encendido. El dispositivo debería poder detectarse en el menú de los dispositivos Bluetooth disponibles, busque el nombre "PTS- {Bluetooth ID}". Verifique que los dígitos del ID impreso en la etiqueta inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter coincidan con los del "PTS-" detectado.
2. Debe emparejar solo un dispositivo al PTS Connect Blu-Adapter. Si empareja el PTS Connect Blu-Adapter con varios dispositivos, aumentará la probabilidad de que los resultados de los análisis se envíen por error al dispositivo equivocado.
3. Cuando se le pida que introduzca un número PIN, escriba el que figura en la parte inferior del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
4. Si el número PIN introducido es correcto, el dispositivo se emparejará con el PTS Connect Blu-Adapter.
5. La tableta, el ordenador o el teléfono inteligente le indicarán mediante un mensaje que el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter se ha emparejado correctamente.
6. Realice un análisis de muestra o envíe un resultado de la memoria del analizador a la aplicación de captura de datos. (Consulte en la guía de usuario del analizador CardioChek PA o CardioChek Plus las instrucciones para ejecutar un análisis).

7. **Importante:** Verifique que los resultados mostrados en el analizador coincidan con los de la aplicación de captura de datos. Este paso asegura que el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter esté correctamente emparejado con la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente asociados.

Desemparejamiento

Consulte la guía de usuario de la tableta, el ordenador o el teléfono inteligente para ver las instrucciones sobre cómo desemparejar el dispositivo en cuestión del PTS Connect Blu-Adapter. Si el PTS Connect Blu-Adapter no se desempareja del dispositivo correctamente, aumentará la probabilidad de que los resultados del análisis se envíen por error al dispositivo equivocado en la próxima transferencia de datos. **Importante:** Este paso asegura que el dispositivo PTS Connect Blu-Adapter no se empareje automáticamente con el dispositivo informático la próxima vez que se utilice.

Transferencia de resultados a una aplicación de captura de datos

Realice los pasos que se indican a continuación para transmitir el resultado de un análisis de un analizador CardioChek PA o CardioChek Plus a un dispositivo PTS Connect Blu-Adapter con una aplicación de captura de datos.

1. Compruebe que el PTS Connect Blu-Adapter esté conectado en el puerto MEMO Chip del analizador CardioChek PA o CardioChek Plus y que este último esté encendido.
2. Ejecute la aplicación en el dispositivo que captura los resultados del PTS Connect Blu-Adapter.
3. Ejecute un análisis en un analizador CardioChek PA o CardioChek Plus.
4. Cuando haya finalizado el análisis y el resultado aparezca en pantalla, este se transfiere automáticamente a la aplicación receptora.

Especificaciones

Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

Valores eléctricos nominales: 5 V CC y 200 mA

Valores ambientales:

- Uso en interiores
- Temperatura: 5-50 °C (41-122 °F)
- Humedad: ≤80 %
- Grado de contaminación: 2
- Altitud: hasta 2000 metros

Códigos sonoros del PTS Connect Blu-Adapter

Fase de funcionamiento	Qué esperar
Error	Un tono largo y bajo.
Emparejamiento/ configuración	Un único y breve tono que se emite una vez cada 10 segundos cuando el producto está listo para emparejarlo a un dispositivo Bluetooth.

Símbolos



Consulte las instrucciones de uso



Límite de temperatura



Precaución



Federal Communications Commission (FCC)



Fabricante



Número de catálogo



Fecha de fabricación



De acuerdo con la directiva RAEE, este producto requiere una recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos



Mantener alejado de la luz solar



Mantener seco



Código de lote



Este producto cumple con los requisitos de la Directiva europea 2014/53/EU para equipos radioeléctricos.



Polymer Technology Systems, Inc.
4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 (EE. UU.)
Línea directa: +1-317-870-5610 · Llamada gratuita desde EE. UU.: 1-877-870-5610 · Fax: +1-317-870-5608
Correo electrónico: customerservice@ptsdiagnostics.com · Sitio web: ptsdiagnostics.com



FCC-ID: A8TBM71S2

Si desea información sobre el producto e instrucciones adicionales, visite el sitio web del fabricante en www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

El nombre y logo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por PTS Diagnostics se efectúa bajo licencia.

CardioChek, MEMo Chip y PTS Connect Blu-Adapter son marcas comerciales de Polymer Technology Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales y nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares.
© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.
PS-005524 ES Rev. 0 02/19