

Per uso professionale con gli analizzatori CardioChek® PA
e CardioChek® Plus



pts connect
Blu-Adapter™

Importanti istruzioni sulla sicurezza

1. Gli utenti devono rispettare le indicazioni nel manuale utente durante l'uso del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter™. L'uso del dispositivo con modalità non specificate nel manuale utente può compromettere la protezione fornita dall'apparecchio.
2. Prima dell'uso, l'utente deve ispezionare visivamente il dispositivo per individuare eventuali danni fisici. Diversamente si potrebbero ottenere risultati inaffidabili o causare danni all'utente.

Requisiti hardware

Materiali forniti

REF 4718 Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter (1)
Include due (2) supporti (solo per l'utilizzo con l'analizzatore CardioChek® PA)

Materiali necessari, ma non forniti, per il trasferimento dei dati

Computer, tablet o smartphone

In grado di connettersi a un dispositivo Bluetooth® BLE

Applicazione

In grado di accettare dati dal dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

Istruzioni per l'assistenza sul dispositivo

PTS Connect Blu-Adapter (solo analizzatori CardioChek PA)

Se si utilizza l'analizzatore CardioChek PA, prima di usare il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter occorre collegare i due (2) supporti inclusi.

Per collegare i supporti al dispositivo PTS Connect Blu-Adapter, è necessario rispettare la procedura riportata di seguito.

1. Premere delicatamente le linguette dei supporti e inserirle nelle due fessure in prossimità della parte superiore del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
2. Rilasciare il supporto per bloccarlo in posizione.
3. Per rimuovere i supporti, premere delicatamente il supporto verso le estremità destra e sinistra ed estrarlo dalle fessure nel dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.



Per informazioni sul prodotto e istruzioni supplementari, visitare il sito Web del produttore all'indirizzo www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

Guida utente PTS Connect Blu-Adapter

Uso previsto del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

Il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter è pensato per trasferire i risultati dei test dagli analizzatori CardioChek PA e CardioChek Plus a un dispositivo compatibile con il Bluetooth, utilizzando la porta MEMo Chip® sull'analizzatore.

Abbinamento

Consultare il manuale utente del tablet, computer o smartphone per istruzioni sull'associazione del dispositivo in uso con il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.

1. Assicurarsi che il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter sia collegato con la porta MEMo Chip sull'analizzatore CardioChek PA o CardioChek Plus e che l'analizzatore sia acceso. Il dispositivo deve essere individuabile. Nel menu dei dispositivi predisposti per Bluetooth, cercare il nome "PTS- {Bluetooth ID}". Verificare che le cifre nell'ID stampato sull'etichetta inferiore del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter corrispondano alle cifre nel nome "PTS- " individuato dal dispositivo.
2. Abbinare un solo dispositivo per volta al dispositivo PTS Connect Blu-Adapter. L'abbinamento del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter a più dispositivi aumenta la probabilità di inviare per sbaglio i risultati dei test al dispositivo errato.
3. Quando viene chiesto di inserire il PIN, immettere il numero stampato sul lato inferiore del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
4. Se il PIN è stato inserito correttamente, il dispositivo viene abbinato correttamente al dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
5. Il corretto abbinamento del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter sarà indicato da un messaggio sul tablet, computer o smartphone.
6. Eseguire un test di prova o inviare un risultato dalla memoria dell'analizzatore all'applicazione di acquisizione dati (per istruzioni sull'esecuzione di un test, consultare la guida utente dell'analizzatore CardioChek PA o CardioChek Plus).

7. **Importante:** verificare che i risultati mostrati sull'analizzatore corrispondano a quelli sull'applicazione di acquisizione dati. Questo passaggio assicura che il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter sia correttamente abbinato al tablet, al computer o allo smartphone assegnati.

Annullamento dell'abbinamento

Per istruzioni sull'annullamento dell'abbinamento del dispositivo in uso con il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter, consultare il manuale utente del tablet, computer o smartphone. Se non si annulla l'abbinamento del dispositivo PTS Connect Blu-Adapter dal dispositivo in uso, aumenta la probabilità di inviare per sbaglio i risultati dei test al dispositivo errato durante l'evento successivo. **Importante:** questo passaggio assicura che il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter non si abbinerà automaticamente al dispositivo informatico all'utilizzo successivo.

Trasferimento dei risultati a un'applicazione di acquisizione dati

Per trasmettere il risultato del test da un analizzatore CardioChek PA o CardioChek Plus a un dispositivo PTS Connect Blu-Adapter con un'applicazione di acquisizione dati, occorre eseguire i passaggi elencati di seguito.

1. Assicurarsi che il dispositivo PTS Connect Blu-Adapter sia collegato con la porta MEMo Chip sull'analizzatore CardioChek PA o CardioChek Plus e che l'analizzatore sia acceso.
2. Eseguire l'applicazione sul dispositivo che acquisisce i risultati dal dispositivo PTS Connect Blu-Adapter.
3. Eseguire un test su un analizzatore CardioChek PA o CardioChek Plus.
4. Una volta completato il test e visualizzato il risultato sullo schermo, il risultato viene automaticamente trasferito all'applicazione di ricezione.

Specifiche

Dispositivo PTS Connect Blu-Adapter

Caratteristiche elettriche: 5 VCC e 200 mA

Caratteristiche ambientali:

- Uso in ambienti interni
- Temperatura: 5-50 °C (41-122 °F)
- Umidità: ≤ 80%
- Grado di inquinamento: 2
- Altitudine: fino a 2.000 metri

Codici segnale acustico PTS Connect Blu-Adapter

Fase operativa	Che cosa aspettarsi
Errore	Un tono lungo, basso.
Abbinamento/ Configurazione	Un singolo tono breve riprodotto una volta ogni 10 secondi quando il prodotto è pronto per l'abbinamento con un dispositivo Bluetooth.

Simboli

 Consultare le istruzioni per l'uso

 Limite di temperatura

 Attenzione

 Federal Communications Commission (FCC)

 Produttore

 Numero di catalogo

 Data di produzione

 Il prodotto è soggetto alla raccolta differenziata prevista per le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo la Direttiva RAEE

 Tenere lontano dalla luce del sole

 Tenere al riparo dall'umidità

 Codice lotto

 Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva europea 2014/53/EU sulle apparecchiature radio.



Polymer Technology Systems, Inc.

4600 Anson Boulevard, Whitestown, IN 46075 USA

Linea diretta: +1-317-870-5610 • Numero verde negli Stati Uniti: 1-877-870-5610 • Fax: +1-317-870-5608

E-mail: customerservice@ptsdiagnostics.com • Sito Web: ptsdiagnostics.com



FCC-ID: A8TBM71S2

Per informazioni sul prodotto e istruzioni supplementari, visitare il sito Web del produttore all'indirizzo www.ptsdiagnostics.com/pts-connect-blu-adapter.

Il marchio denominativo e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di PTS Diagnostics è concesso in licenza.

CardioChek, MEMo Chip e PTS Connect Blu-Adapter sono marchi registrati di proprietà di Polymer Technology Systems, Inc. Tutti gli altri marchi di fabbrica e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

© Copyright 2019 Polymer Technology Systems, Inc.

PS-005524 IT Rev. 1 02/19