

pts panels®

Controlos de Colesterol HDL

Para utilização profissional com os analisadores CardioChek® PA e CardioChek® Plus (v1.08 e inferiores)

FINALIDADE

Para utilizar com as tiras de teste profissionais PTS Panels® como materiais de controlo de qualidade, para determinar a precisão e detetar desvios analíticos sistemáticos do seu sistema de análises.

RESUMO E EXPLICAÇÃO

Os controlos de colesterol HDL profissionais PTS Panels, contêm colesterol, que reage com as tiras de teste para produzir cor. Quanto mais escura é a cor, mais elevada é a concentração de colesterol HDL. O resultado para cada nível de controlo deverá encontrar-se no intervalo especificado no Cartão de intervalos para controlo de qualidade incluído com estes materiais. Quando os resultados forem questionáveis, devem efetuar-se controlos para verificar o desempenho do sistema de análises, por forma a obedecer aos requisitos de controlo de qualidade das instalações, ou conforme exigido pelas entidades de acreditação e regulamentação locais.

Nota: Os analisadores profissionais CardioChek® Plus v.1.09 e superiores não exigem controlos de colesterol HDL.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Os controlos de colesterol HDL de autodiagnóstico PTS Panels contêm:

Glicose (de milho)	≥ 680 mg/dL
Glicerina (sintética)	≥ 58,5 mg/dL
Colesterol (de lã de ovelha)	≥ 30 mg/dL
Conservantes (isotiazolonas)	≤ 0,01%
Ingredientes inertes	

Recorde que os níveis são variáveis

PRECAUÇÕES

- Para utilização em diagnósticos *in vitro*. Destina-se exclusivamente a utilização por profissionais.
- Não ingerir o conteúdo.
- Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Os materiais podem ser eliminados no lixo comum.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO

Guardar num local fresco e seco, a uma temperatura ambiente de 20-30°C (68-86°F). Pode ser guardado no frigorífico a 2-8°C (35-46°F). Não congelar. O produto está pronto a utilizar. Tapar novamente após a utilização.

Ter cuidado para não contaminar a ponta da pipeta. Não utilizar para além da data de validade indicada no frasco. O produto aberto é estável durante um período mínimo de dez meses à temperatura ambiente.

MATERIAIS FORNECIDOS

- Dois (2) frascos de controlos de colesterol HDL (um de cada de Nível 1 e Nível 2)

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

- Analisador profissional CardioChek PA ou CardioChek Plus
- Tiras de teste profissionais PTS Panels e MEMO Chip® com o mesmo número de lote

PROCEDIMENTO

IMPORTANTE: Leia todas as instruções cuidadosamente antes de efetuar o teste.

Procedimento de teste dos controlos de colesterol HDL

- Introduza o MEMO Chip correspondente ao lote das tiras.
- Prima um dos dois botões para ligar o instrumento (ON).
- Prima o botão Seguinte até o ecrã apresentar a palavra UTIL.
- Prima o botão Enter.
- Prima o botão Seguinte até surgir a indicação EXECUTAR CONTROLO.
- Na opção EXECUTAR CONTROLO no ecrã do analisador, prima